

Veterinaire droogkasten voor het bewaren van uw video-endoscopen en fiberscopen.

Reiniging en desinfectie zijn cruciale onderdelen binnen het onderhoudsproces van uw endoscopisch materiaal. Nadat de flexibele endoscopen goed zijn gereinigd en gedesinfecteerd, adviseren wij om de flexibele endoscopen verticaal op te hangen. Wij zien regelmatig dat veel flexibele endoscopen worden opgeruimd in de transportkoffer (waarin ze zijn geleverd) i.p.v. op te hangen om te laten drogen. Door de video endoscoop verticaal op te hangen stroomt het overtollige vocht, incl. eventuele bacteriën, weg. Stöpler Medical B.V. verstrekt, in nauwe samenwerking met Jansen Medicars, speciale droogkasten voor het ophangen en drogen van uw flexibele endoscopen.



Nadat de flexibele endoscopen gereinigd en gedesinfecteerd zijn, kunnen deze in de droogkast worden bewaard. De endoscopen hangen verticaal in speciale houders, droog en stofvrij. In de droogkast is een actieve ventilatie aanwezig, die aangevoerde lucht filtert voordat het de kast wordt ingeblazen. Indien de ventilatie wordt geactiveerd, wordt tevens de interne verlichting ingeschakeld, zo weet u altijd dat de endoscoop wordt gedroogd. In de droogkast zitten specifieke stoffilters om luchtdeeltjes tegen te houden en schone lucht de kast in te brengen. Een navulling van deze stoffilters kunt u per verpakking van 5 stuks bijbestellen. Naar gelang het operatie programma, adviseren wij periodiek de filters te vervangen.

Een modulaire droogkast met diverse opties

De droogkast is een modulair systeem en kan naar wens worden ingericht en uitgebouwd. Elke module bestaat uit een droogkast met ventilatiesysteem, glazen deur en een houder die naar keuze kan toegevoegd worden. Een eventuele tweede module kan aan de basis module eenvoudig worden gekoppeld en ingericht, denkende aan bijvoorbeeld een video-endoscoop houder, een fiberscoop houder of een combinatie van beiden. Hieronder zijn de verschillende opties met de bijbehorende artikel code te zien.

Artikel code	Omschrijving
JAN R95.62.00	Basis - droogkast veterinaire endoscopen - enkele unit
JAN R95.62.01	Aanbouw - droogkast veterinaire endoscopen
JAN R95.62.02	Houder voor video-endoscoop
JAN R95.62.03	Houder voor fiberscoop
JAN R95.62.04	Houder voor fiberscoop - toevoeging aan houder video-endoscoop
JAN R95.62.05	Houder voor 3 fiberscopen
JAN R95.62.06	Filters, verpakking van 5 stuks

Doordat de droogkast erg compact is, is het noodzakelijk dat deze aan de bovenzijde aan de muur wordt bevestigd. Alleen dan staat de kast voldoende stabiel voor een veilig gebruik! Voor de installatie worden stelvoetjes en een beugel voor de wandbevestiging meegeleverd. De kasten worden afgeleverd, kant en klaar en eventuele hulp bij het bevestigen aan de muur kan meegenomen worden als optie.

Specificaties droogkast

Afmetingen:	Basis module: BxDxH = 362 x 200 x 2015 mm Aanbouw module: BxDxH = 330 x 200 x 2015 mm
Gewicht:	Basis module: 35 kg Aanbouw module: 23,5 kg
Elektrische aansluiting:	Spanning: 85 – 305 VAC Frequentie: 47 – 440Hz Nominaal vermogen: 2W Aansluiting: C14 ingang en C13 uitgang voor aanbouw module
Gebruikte materialen:	Staal Aluminium Glas
Afwerking:	Poedercoating
Kleuren:	RAL9016 (wit), RAL7024 (grijs)

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via +31 (0)30 2644915 of per email veterinair@stopler.nl of veterinair@stopler.be.